

Efficiente Versatile Pratico

Nuovo sistema per la demineralizzazione Demin30

Demin30 è un sistema di demineralizzazione con resina a letto misto e a scambio ionico che permette la demineralizzazione totale dell'acqua.

Facile da installare su diversi modelli di autoclave, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e salvaguardare lo strumentario sterilizzato, allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di riprocessamento.

Il filtro è posizionabile sul piano di lavoro o all'interno del mobile di sterilizzazione.

Demin30 può fornire acqua demineralizzata anche a una seconda autoclave.



1 EFFICIENZA



Demin30 filtra fino a 580 litri* di acqua con una sola cartuccia garantendo un ottimo livello di purificazione.

Il carico e lo scarico automatico dell'acqua garantiscono efficienza, praticità e risparmio di tempo.

*Calcolato su un'acqua con conduttività pari a 250 µS/cm

2 VERSATILITÀ



Sistema modulare per l'alimentazione di una o due autoclavi, disponibile anche nella versione conforme alla normativa EN 1717 per il riflusso dell'acqua. Installazione adattabile su diversi modelli di autoclave.

3 PRATICITÀ




La sostituzione della cartuccia è rapida e non richiede l'utilizzo di utensili. La cartuccia va sostituita quando la conduttività dell'acqua supera i 15 µS/cm.

Le autoclavi da 24L di NSK Dental Italy segnalano automaticamente il raggiungimento di questo valore per avvertire che è ora di sostituire il filtro.

Demin30

SISTEMA PER LA DEMINERALIZZAZIONE TOTALE DELL'ACQUA

NUOVO

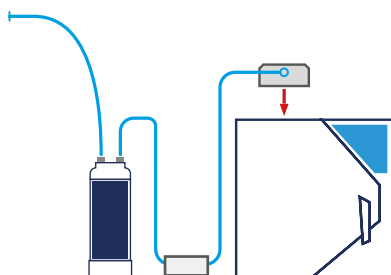


MODELLO **Demin30 - Kit EN 1717**
CODICE **98001010**

MODELLO **Demin30 - Kit 2a Autoclave EN1717**
CODICE **98001030**

Kit fornito con sistema di carico acqua dall'alto, in conformità con la normativa EN 1717.

Normativa EN 1717: "Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso"

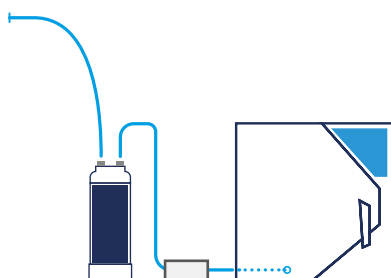

MODELLO **Demin30 - Kit**
CODICE **98001000**

MODELLO **Demin30 - Kit 2a Autoclave**
CODICE **98001020**

Kit fornito con sistema di allacciamento diretto sul retro dell'autoclave grazie al tubo in dotazione per il carico dell'acqua (Ø 1/4") e all'elettrovalvola (24 VDC e 0,5 A).



MODELLO **Demin30 - Demineralization Resin Filter**
CODICE **230000**

Cartuccia Demin30
Dimensioni: diametro 135 mm, altezza 385 mm

UTILIZZO E INSTALLAZIONE

Demin30 è un sistema per l'alimentazione automatica di acqua demineralizzata per autoclavi. Il filtro deve essere alimentato solo con acqua potabile con una pressione in entrata compresa tra i 2 bar e i 3 bar. Grazie al tubo in dotazione è possibile eseguire lo scarico automatico dell'acqua.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

La sostituzione della cartuccia può essere eseguita dal personale della clinica senza l'utilizzo di utensili. La sostituzione va eseguita al massimo entro un anno dall'installazione, anche se non esaurita. Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).

