



Pannello di controllo

Impostazione dell'irrigazione

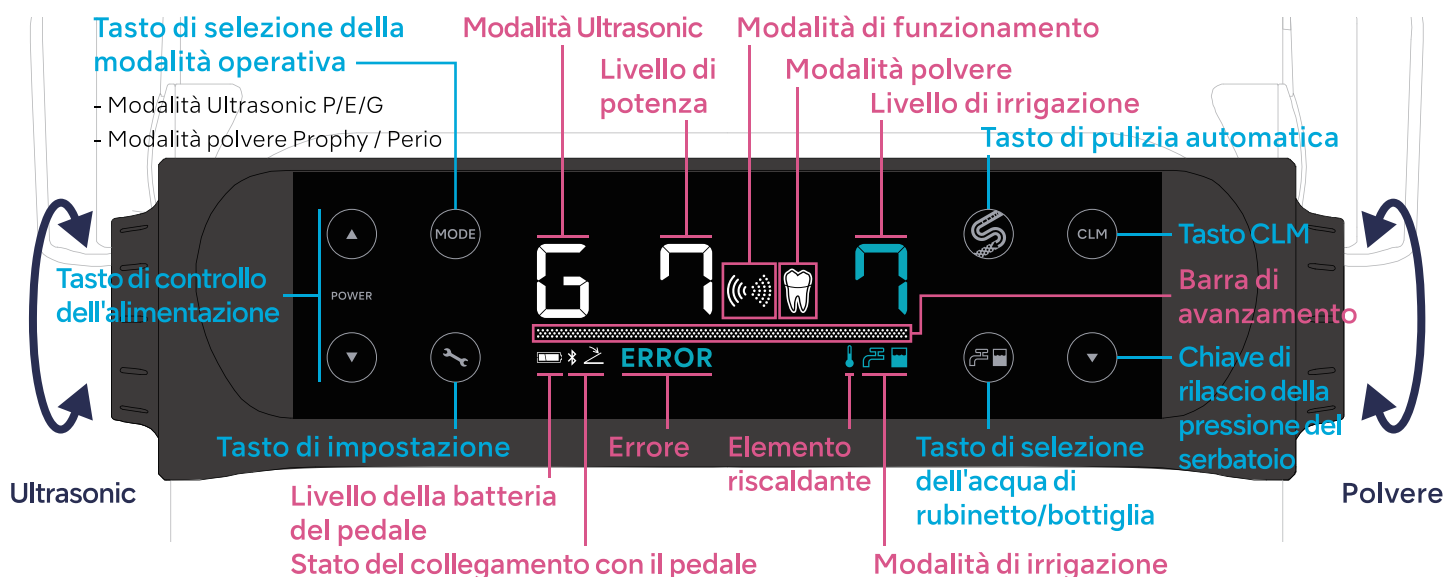


Pedale

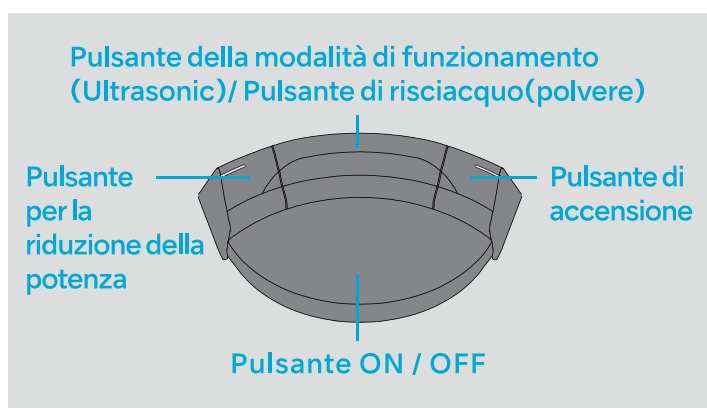

Utilizzo della modalità Ultrasonic


- 1 Impugnare il manipolo Ultrasonic.
- 2 Selezionare la modalità Ultrasonic (P/E/G).
- 3 Impostare il livello di potenza.
- 4 Selezionare il metodo di irrigazione.
- 5 Regolare il livello di irrigazione.
- 6 Premere il pulsante ON / OFF

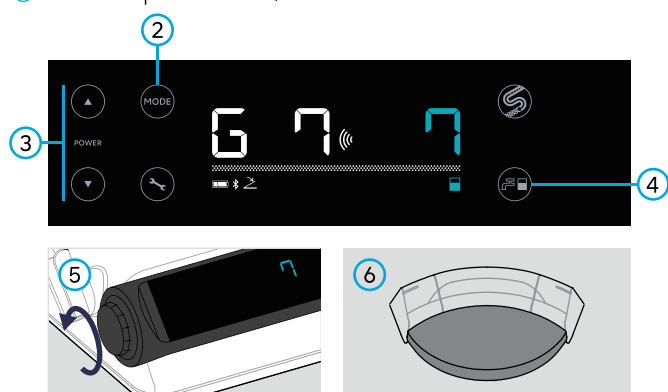

Utilizzo della modalità polvere

Modalità	Serbatoio	Manipolo	Puntale	Utilizzo	Polvere

- 1 Impugnare il manipolo polvere.
- 2 Selezionare la modalità polvere (Prophy / Perio).
- 3 Impostare il livello di potenza.
- 4 Regolare il livello di irrigazione.
- 5 Premere il pulsante ON / OFF.

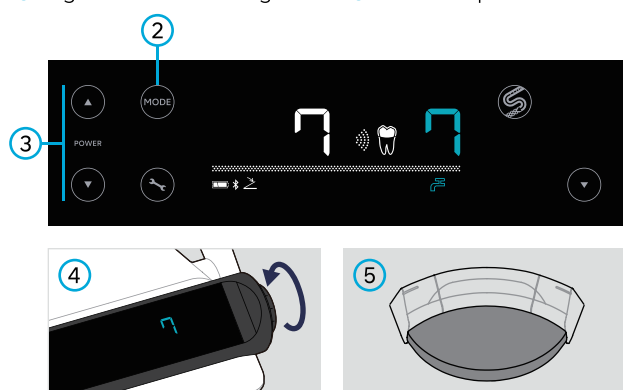

Pulizia automatica



Modalità di pulizia automatica da attivare	Frequenza di esecuzione delle modalità di pulizia automatica	Utilizzo effettivo di Varios Combi Pro2		
		Ultrasonic e Powder	Polvere Solo	Ultrasonic Solo
	Dopo ogni trattamento	W(Powder)	W(Powder)	—
	Una volta al giorno (dopo il trattamento finale)	D	P	W (Ultrasonic)

W (Ultrasonic) : Rimozione dell'acqua




W (Polvere) : Rimozione dell'acqua e della polvere di spurgo

P : Rimozione della polvere dal tubo del manipolo
Rimozione della polvere dal circuito della polvere
Rilascio della pressione del serbatoio



D : Rimozione dell'acqua dal cordone/tubo del manipolo
Rimozione della polvere dal circuito della polvere
Rilascio della pressione del serbatoio

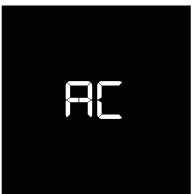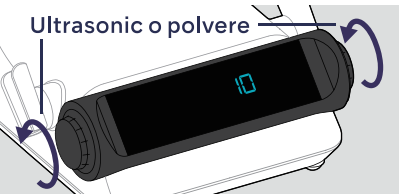

Impostare il livello di irrigazione su 10. Toccare  per 3 secondi, finché non viene visualizzato "AC".

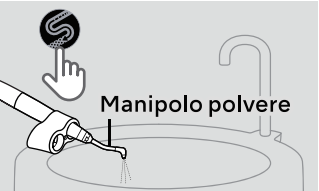
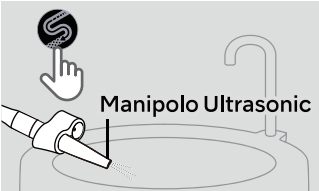
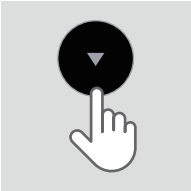


Selezionare "W". Inserire il manipolo con il cordone o il tubo nel supporto CLM. Toccare . Quando appare "Fin", toccare .


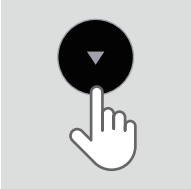
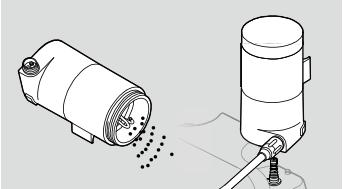


Smaltire la polvere e collegare il serbatoio. Selezionare "D" o "P". Inserire i manipoli con cordone / tubo nel supporto CLM. Toccare . Quando appare "Fin", toccare .


Decontaminazione / prevenzione della formazione di biofilm (Modalità CLM)

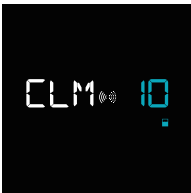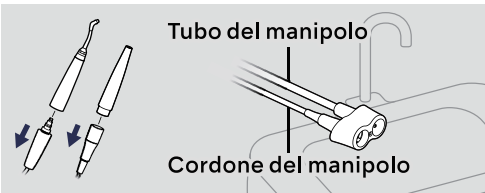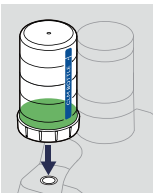

Riempire la bottiglia CLM con b.clean o Bilpron (ALPRO) (non diluito). Inserire la bottiglia CLM. Rimuovere il cordone / tubo del manipolo da ciascun manipolo e inserirlo nel supporto CLM. Toccare  per 3 secondi, finché non appare la visualizzazione qui sopra.

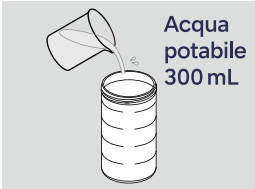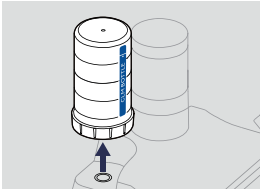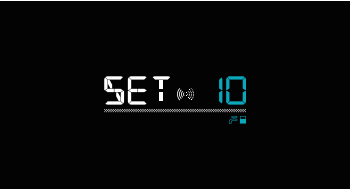

Toccare  per 3 secondi, finché non si avvia la modalità CLM. Quando appare la visualizzazione qui sopra, spegnere l'alimentazione e attendere almeno 12 ore. Accendere l'alimentazione. Rimuovere la bottiglia CLM. Riempire la bottiglia di irrigazione disinfettata con acqua potabile.

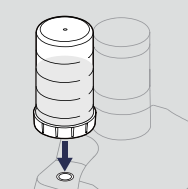

Inserire la bottiglia di irrigazione. Toccare  per 3 secondi, fino all'inizio dello scarico. La modalità CLM è completa quando appare la visualizzazione sopra riportata. Toccare  per passare alla visualizzazione normale.