



Pannello di controllo

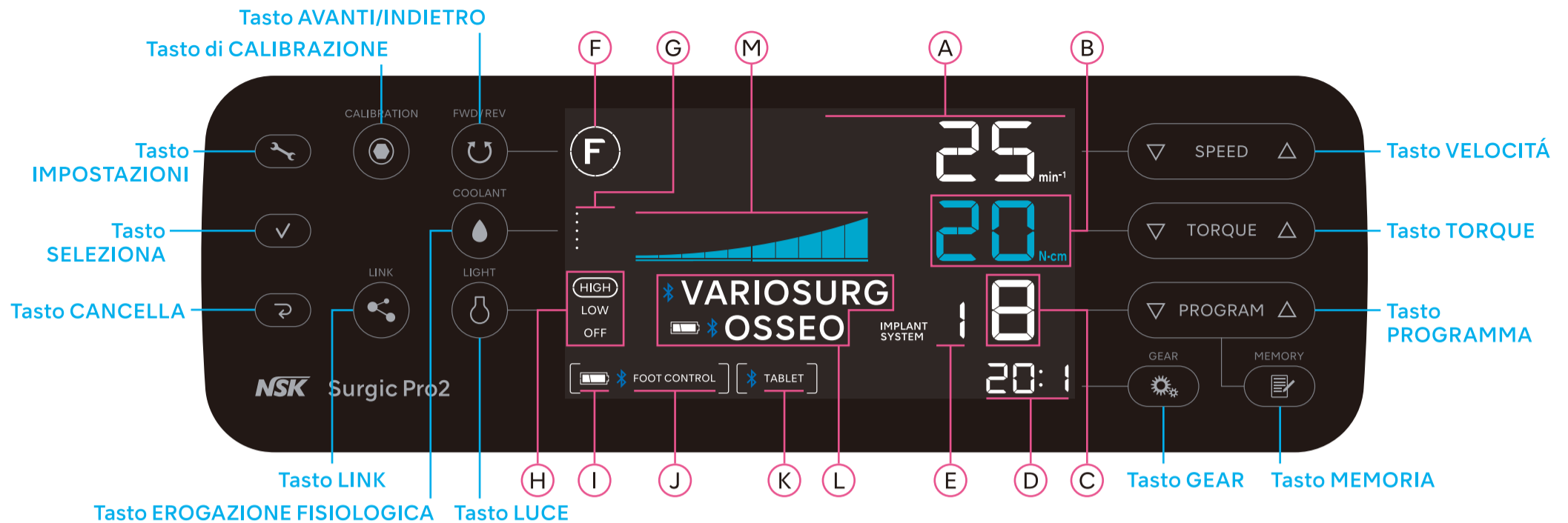


Pedale di controllo

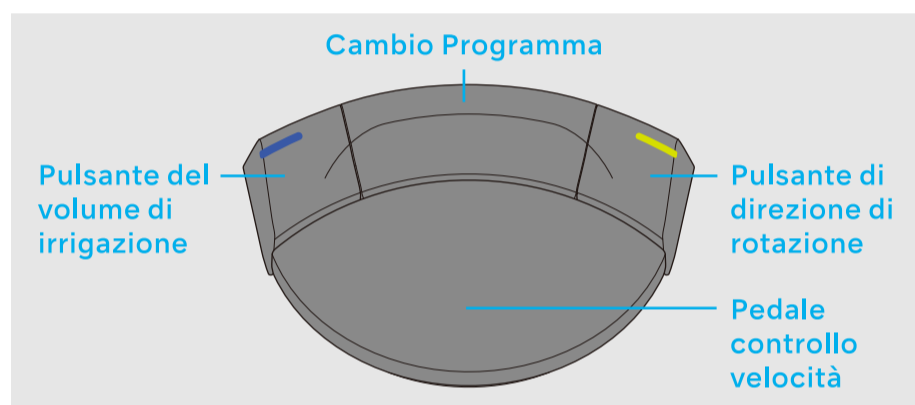

A	Velocità di rotazione	H	Intensità luce
B	Torque	I	Livello della batteria del pedale di controllo
C	Nr. Programma	J	Stato di connessione con il pedale di controllo
D	Rapporto di trasmissione	K	Stato di connessione tra un terminale esterno e l'unità di controllo
E	Nr. del sistema di impianto	L	Stato di connessione tra VarioSurg3 e Osseo 100+
F	Direzione di rotazione	M	Livello corrente della coppia operativa
G	Livello di flusso della soluzione refrigerante		


Preparazione per l'utilizzo

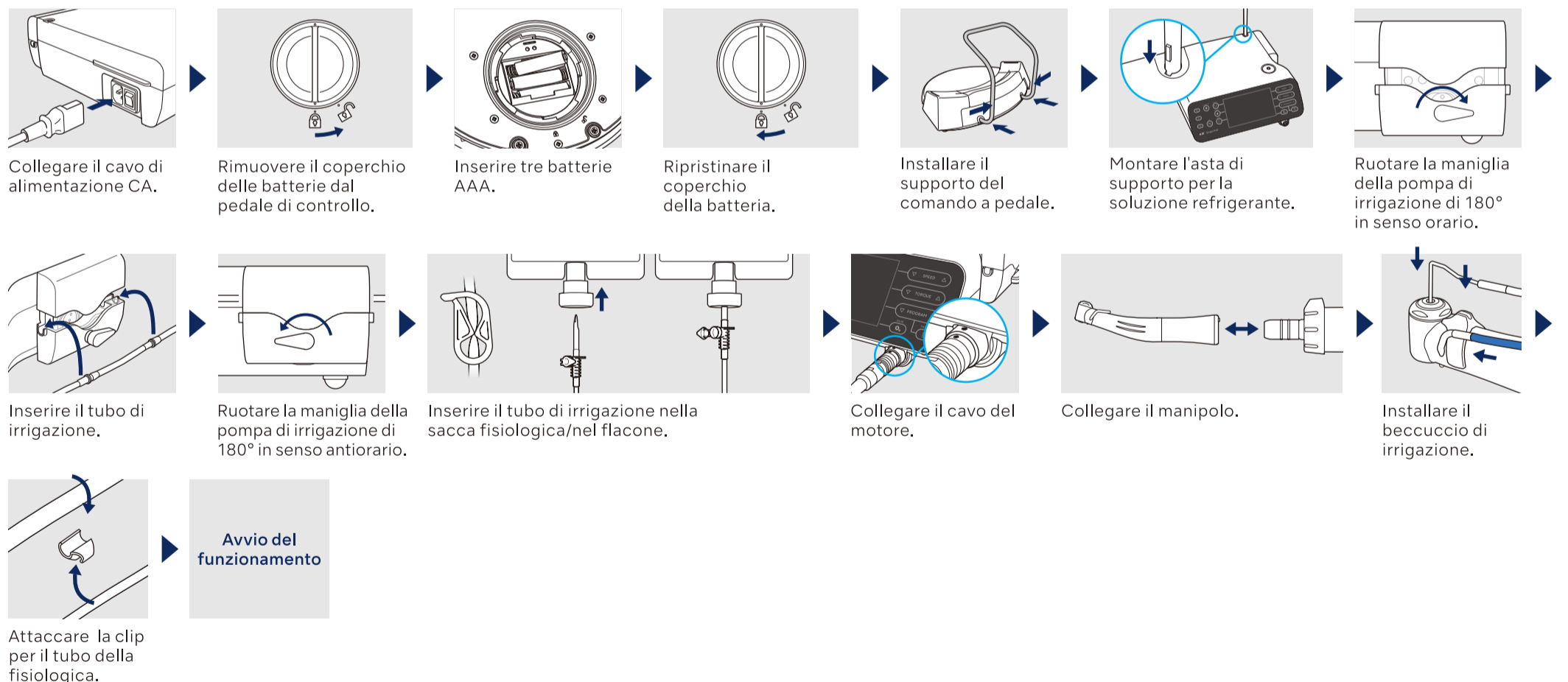



Avvio del funzionamento






Il primo passo dopo l'acquisto (accoppiamento con ogni dispositivo)


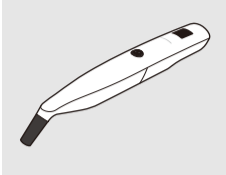
1
Almeno 2 sec.

Tenere premuto il tasto IMPOSTAZIONE (SETTING). Viene visualizzato "BLE SET".


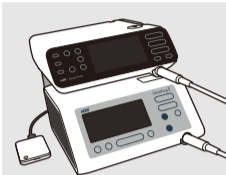
2

Premere il tasto ENTER.

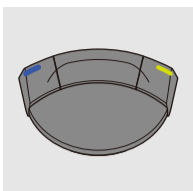

3

Premere il tasto TORQUE per selezionare il dispositivo. AVVISO: Le scritte sullo schermo, ad eccezione di "BLE SET" e "PAIRING" si accendono e si spengono.



Pedale di controllo
 

Osseo 100+
 

VarioSurg3
 

Terminale Esterno
 

Premere il tasto ENTER.

▼ Pedale di controllo




Questa operazione non è necessaria quando si utilizza Surgic Pro2 per la prima volta dopo l'acquisto. Eseguire la procedura se il comando a pedale non è accoppiato o quando si utilizza un altro comando a pedale appena acquistato. AVVISO: il collegamento può essere eseguito entro 10 minuti dall'inserimento della batteria.


Premere il pulsante SELEZIONA (ENTER).

Approx. 10 sec.

Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti destro, sinistro e il pedale centrale.


L'unità di controllo emette un segnale acustico, quindi viene visualizzato "OK". L'accoppiamento è stato eseguito. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato.

Connesso



Premere il tasto CANCELLA (CANCEL) per tornare alla schermata iniziale.

▼ Osseo 100+




Tasto ON
Premere il tasto di accensione per accendere l'apparecchio.


Per almeno 3 sec
Tenere premuto il tasto di accensione.


Viene visualizzato "PA".


L'unità di controllo emette un segnale acustico, quindi viene visualizzato "OK". L'accoppiamento è stato eseguito. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato.

Connesso



Premere il tasto CANCELLA (CANCEL) per tornare alla schermata iniziale.

▼ VarioSurg3




Accendere il dispositivo.
Collegare prima di tutto il Modulo all'unità.


Tenere premuto il pulsante del Modulo.


Rilasciare il pulsante quando la luce LED diventa blu.


L'unità di controllo emette un segnale acustico, quindi viene visualizzato "OK". L'accoppiamento è stato eseguito. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato. La luce LED su Modulo diventa verde.

Connesso



Premere il tasto CANCELLA (CANCEL) per tornare alla schermata iniziale.

▼ Terminale esterno




Avviare l'app.
Installare l'app prima di iniziare.


Cliccare l'icona.


Premere "Start".


Inserire il codice "123456" e premere "Pair" (accoppia).


L'unità di controllo emette un segnale acustico, quindi viene visualizzato "OK". L'accoppiamento è stato eseguito. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato.

Connesso



Premere il tasto CANCELLA (CANCEL) per tornare alla schermata iniziale.



www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2